

# EN SNABB CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGEN

## Är patienten intresserad av Eversense E3 CGM-systemet?

- Granska Eversense E3 CGM-systemet med patienten (utöver allt annat du gör under ett normalt besök).
  - Ge patienten en patientbroschyr
  - Gå igenom kompatibla enheter
  - Gå igenom kontraindikationer
  - Gå igenom kontrollmätning av blodsocker
  - Gå igenom viktiga fördelar med Eversense E3 CGM-systemet
    - › Långtidssensor
    - › Avtagbar smartsändare som varnar genom att vibrera
    - › Noggrannhet

## När dagen Eversense E3 CGM-systemet har levererats till mottagningen

- Förvara sensorförpackningen i kylskåpet när den har kommit till mottagningen
- Säkerställ att nya insättningskit finns på mottagningen
- Boka tid för insättning med patienten
- Gå igenom instruktionen Förbered dig inför ditt CGM-besök
  - Be patienten att ladda ner appen och skapa ett konto
- Säkerställ att det material som krävs är tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
- Kontrollera sista förbrukningsdag för allt material
- Säkerställ att det finns ett behandlingsrum och personal tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
  - Procedurkit eller motsvarande
  - Sterila handskar
  - Lidokain 1% eller 2% (med eller utan adrenalin)
  - Klorhexidin- eller betadinlösning eller 3 st desinficerande tvättsuddar
- Komma igång med utbildningen
  - Du hittar utbildningsmaterial på **diabetes.ascensia.se**
  - Ladda ned utbildningsmaterial från Ascensia Diabetes Cares hemsida (diabetes.ascensia.se)
  - Be Ascensia Diabetes Cares kundsupport om utbildningsmaterial 020 - 83 00 84 (08:00-16.30)

## Dagen för insättning av Eversense E3 CGM-systemet!

- Säkerställ att smartsändaren är laddad
- Bekräfta att patienten har laddat ner appen till sin mobila enhet
- Parkoppla smartsändaren och den mobila enheten
- Länka sensorn till smartsändaren/den mobila enheten
- Ge patienten dubbelhäftande plåster, asken med smartsändaren och material
- Se till att patienten vet hur Eversense E3 fungerar och vad som händer efter insättningen
- Informera patienten om hur de synkar sin data med mottagningen

## Eversense E3 CGM-systemet är aktivt

- Lägg upp en uppföljningsplan/återbesök
- Boka in besök för återinsättning ca 180 dagar
- Kom ihåg att beställa Eversense E3 CGM-sensorn igen 1 månad innan patientens besök
- Du hittar digitalt utbildningsmaterial på **diabetes.ascensia.se**



# EN SNABB CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGEN

## Information om material till mottagningen



### ► Eversense E3 -sensorkit (90008166)

- Förpackningen måste placeras i kylskåp direkt
- Kontrollera sista förbrukningsdatum
- 1 paket per patient
- En reservsensor rekommenderas för mottagningen



### ► Insättningskit (90008151)

- Innehåller snittmall, insättningsinstrument och bruksanvisning
- Kontrollera sista förbrukningsdatum
- 1 paket skickas automatiskt med varje beställd sensor
- Ett reservpaket med verktyg rekommenderas för mottagningen



### ► E3 Smartsändarkit (90008148)

- Innehåller: laddningsdocka, väggadapter och bruksanvisningar
- Ladda smartsändaren samma dag som insättningen görs
- 1 paket per ny patient med ett års garanti



### ► Plåsterkit (90008165)

- 150 vita och 30 transparenta dubbelhäftande plåster (totalt 180 dubbelhäftande plåster)
- Kontrollera sista förbrukningsdatum

Kan beställas separat:

- 30 vita dubbelhäftande plåster (90007704)
- 30 genomskinliga dubbelhäftande plåster (90007705)



### ► Procedurkit (90007877) eller motsvarande

- Innehåller icke-sterila och sterila artiklar
- Innehåller INTE sterila handskar, lidokain, klorhexidin/betadin

Systemet Eversense®E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Systemet är indicerat för att användas för att ersätta blodglukosmätningar (BG) med fingerstick för beslut om diabetesbehandling. Fingersticksmätningar krävs fortfarande för kalibrering, i första hand en gång om dagen efter dag 21, och när symtomen inte stämmer överens med CGM-information, eller när patienten tar mediciner av tetracyclinklassen. Proceduren för insättning och borttagning av sensor utförs av en vårdgivare. Endast läkare kan förskriva Eversense E3 CGM-system. Vid frågor om förskrivning, vänligen kontakta din vårdgivare.

**För viktig säkerhetsinformation, se <https://global.eversenseddiabetes.com/safety-info>**

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia och logotypen Ascensia Diabetes Care är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare och används enbart för informativa syften. Inget samband eller sponsring ska antas eller antyd.



DISTRIBUERAS AV  
Ascensia Diabetes Care Sweden AB  
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4, 169 73 Solna

Eversense kundsupport  
020-83 00 84 | [eversense.se@ascensia.com](mailto:eversense.se@ascensia.com)

© 2022 Senseonics, Incorporated. Med ensamrätt.  
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.



Continuous Glucose Monitoring System

TILLVERKAD AV  
SENSEONICS, INC.  
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown  
MD 20876-7005 | USA  
301 515 7260 | [global.eversenseddiabetes.com](https://global.eversenseddiabetes.com)