

Instruktioner att ta med hem

Diskutera med din vårdgivare och läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder enheten. Rådfråga alltid din vårdgivare innan du gör ändringar i behandling, kost eller motion.

Så tar du hand om snittområdet för korrekt läkning

- Bada och simma inte och undvik ansträngande sporter och aktiviteter under fem dagar.
- Låt Tegaderm[™]-förbandet sitta kvar över Steri-Strips[™]-suturetejpen i två dagar. Byt sedan ut det mot ett rent Tegaderm[™]-förband eller ett sterilt förband. Var försiktig så att inte Steri-Strips[™]-suturetejpen följer med när du tar bort Tegaderm[™]-förbandet.
 - Undvik att blöta ner Tegaderm[™]-förbandet när du duschar.
 - Byt Tegaderm[™]-förbandet tidigare än efter 2 dagar om gasbindan ser väldigt smutsig ut. Var försiktig så att du inte tar bort Steri-Strips[™]-suturetejpen.
 - Du kan placera sändaren över Tegaderm[™]-förbandet efter den första dagen.
- Låt Steri-Strips[™]-suturetejpen sitta kvar tills de ramlar av (normalt 5–7 dagar).
- Meddela din vårdgivare om:
 - Steri-Strips[™]-suturetejpen lossnar innan snittet har läkt helt
 - du upplever smärta, rodnad, svullnad, värme eller läckande vätskor vid snittet
 - du får feber.



Viktiga steg att komma ihåg


Uppvärmningsfas: Pågår under de första 24 timmarna efter insättning av sensorn. Inga glukosvärden visas i Eversense-appen. Du behöver därför inte ha på dig smartsändaren under uppvärmningsfasen.

Initieringsfas: Efter 24 timmar placerar du smartsändaren över sensorn med det dubbelhäftande plåstret.

Kontrollera att smartsändaren är fulladdad innan du placerar den över sensorn.

1


Tryck på strömknappen och håll den intryckt i 5 sekunder för att slå PÅ smartsändaren

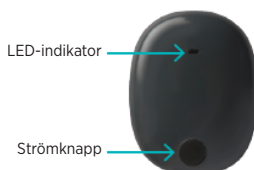

2

Sätt fast smartsändaren på armen

- Öppna och använd placeringsguiden i appen för att placera smartsändaren.
- Det kan ta flera sekunder innan signalstyrkan visas. Placera smartsändaren där signalstyrkan visar 2 till 3 streck (bra till utmärkt).
- Stäng placeringsguiden när anslutningen har upprättats.

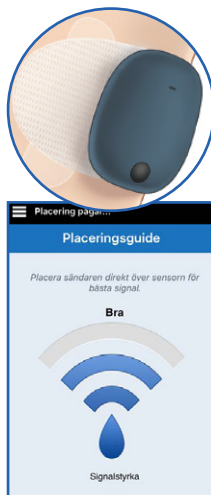

3

Inom 10 minuter – den första kalibreringen ska ha gjorts

- Du får en uppmaning om att kalibrera i mobilappen.



- Gör en blodglukoskontroll med fingerstick och ange glukosvärdet i appen inom 10 minuter efter fingersticket.
- Du får ytterligare tre kalibreringsuppmaningar under initieringsfasen. Slutför alla inom 36 timmar.
- **Mer information finns i bruksanvisningen**

Obs! Glukosvärden visas i appen några minuter efter att den andra kalibreringen har slutförts.

Tips om varningar och aviseringar

För många varningar eller vibrationer?



- Gå igenom inställningarna för glukosmål och varningar med din vårdgivare.
- Läs om "Stör ej" i bruksanvisningen.

Får du en varning om starkt omgivningsljus?

- Flytta dig från direkt ljus.
- Täck smartsändaren med mörka kläder.
- Flytta smartsändaren 1 cm uppåt så att den täcker sensorn bättre.

Korrekt kalibreringstips



- Tvätta och torka händerna grundligt innan du gör ett blodglukostest med fingerstick.
- Lägg in kalibreringsvärdet inom 10 minuter efter att du har kontrollerat din blodglukos.
- Blodglukos och sensorglukos kanske inte matchar exakt.
- Kalibreringsvärdet måste ligga mellan 2,2 och 22,0 mmol/L.
- Undvik att kalibrera när glukosnivån förändras snabbt (som efter måltider, efter att du har tagit insulin eller under träning).
- Håll smartsändaren på plats över sensorn 5 minuter innan och 15 minuter efter varje kalibrering.

Ytterligare tips

- **Gör alltid ett blodglukostest med fingerstick om du upplever att du har symptom på lågt eller högt blodglukos**
- Byt det dubbelhäftande plåstret dagligen och diskutera ytterligare behov av förband med din vårdgivare.
- Ladda smartsändaren i ca 15 minuter varje dag. Låt den vara ansluten tills LED-lampan lyser med ett fast grönt sken.
- Kontakta din vårdgivare om du drabbas av en medicinsk nödsituation eller om du har frågor om behandlingsplanen för din diabetes.
- Kontakta Ascensia Diabetes Cares kundsupport om du behöver hjälp eller har frågor om Eversense XL CGM-systemet på: 020-83 00 84 (Vardagar 8.00-16.30)



Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabets.com/safety-info.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Apple Watch® är en produkt från Apple, Inc. och kan köpas separat från en auktoriserad Apple-återförsäljare. Apple Watch medföljer inte Eversense CGM-systemet.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.



Continuous Glucose Monitoring System

TILLVERKAD AV
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301 515 7260 | global.eversensediabets.com



DISTRIBUERAS AV
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4, 169 73 Solna
Eversense kundsupport
Tel: 020-83 00 84
E-post: Eversense.se@ascensia.com
Hemsida: diabetes.ascensia.se