


☰ Så enkelt ... anpassningsbara inställningar

Med funktionen **Ljudinställningar** i Eversense®-appen kan du anpassa ditt Eversense XL CGM-system på flera praktiska sätt:


1 Ställa in anpassade varningsljud

Du kan välja olika ljud för varningar om hög och låg glukosnivå.


➤ Tryck på **Meny > Inställningar > Ljudinställningar**

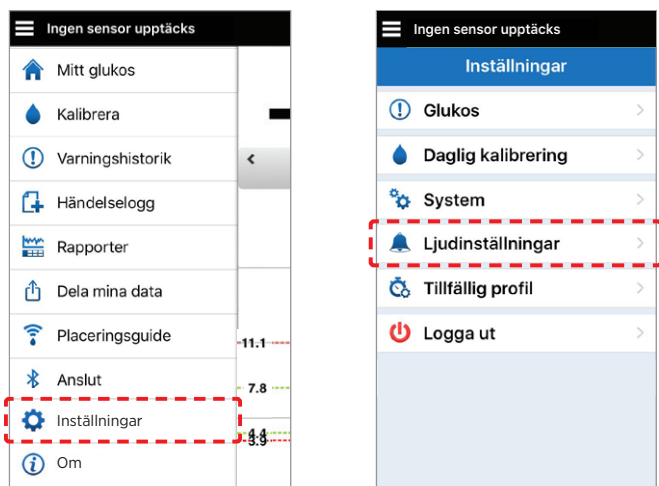

➤ Tryck på varje varning för att välja varningsljud.

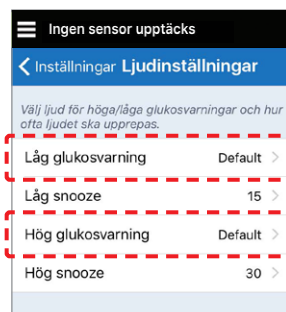

➤ Tryck på < **Tillbaka** när du är färdig så kommer du tillbaka till skärmen Ljudinställningar.

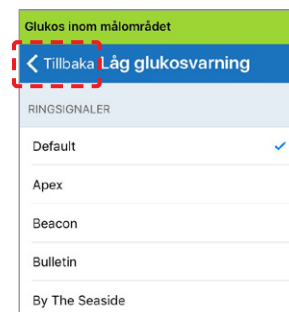


TIPS: Bläddra för att lyssna på de olika tillgängliga signalerna. Signalerna bör väcka din uppmärksamhet och skilja sig från alla andra ljudaviseringar du har ställt in.

2 Ställa in upprepning av varningar

Inställningarna **Låg snooze** och **Hög snooze** avgör hur ofta varningarna upprepas om din glukosnivå stannar under inställningen för lågvarning eller över inställningen för högvarning.

➤ Tryck på **Meny > Inställningar > Ljudinställningar**

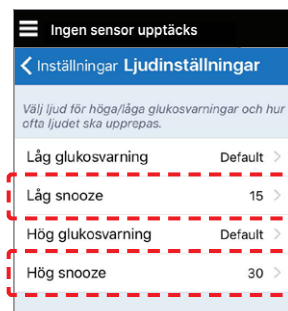

➤ Tryck på **Låg snooze** eller **Hög snooze** för att välja upprepningsintervall för varningen.

- Intervall för Låg snooze: 5 till 30 minuter.
- Intervall för Hög snooze: 15 till 180 minuter.


Ett exempel på inställning för upprepning av varningar

Susanna är frustrerad över alla glukosvarningar hon får. Hon inser att hennes snooze-funktion för hög glukosvarning är inställd på 30 minuter, men hon vet att det ofta tar över en timme innan den höga glukosnivån sjunker när hon har tagit korrigeringsinsulin. **Efter att ha pratat med sin vårdgivare ändrar hon snooze-inställningen för hög glukosvarning till 90 minuter, så att hennes kropp hinner reagera på insulinet.**

VIKTIGT: Rådfråga alltid din vårdgivare om du är osäker på hur lång tid du bör ställa in för upprepning av snooze-varningar.

Så enkelt ... anpassningsbara ljudinställningar

3 Använda funktionen *Stör ej* i Eversense®-mobilappen

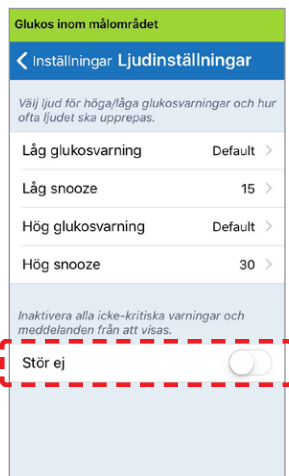

Genom att aktivera funktionen **Stör ej (DND - Do Not Disturb)** under *Ljudinställningar* stänger du av varningsljuden och vibrationerna på kroppen för icke-kritiska varningar. Att aktivera Stör ej-läget i Eversense-appen skiljer sig från att aktivera Stör ej-läget på din mobila enhet. I diagrammet nedan hittar du en mer ingående förklaring.

Funktionen Stör ej aktiverad	Om den är aktiverad		
	Du känner	Du hör	Du ser
DND i Eversense-appen	Vibrationer på kroppen endast för kritiska varningar*	Varningsljud endast för kritiska varningar*⁽¹⁾	Popup i appen endast för kritiska varningar*
DND på mobil enhet	Vibrationer på kroppen för alla varningar	Ej tillämpligt	Popup i appen för alla varningar⁽²⁾

1. Förutsatt att ljudet inte är avstängt på enheten, 2. När Eversense-appen är öppen i förgrunden.

OBS! Möjligheten att få varningar är en viktig fördel med CGM, så vi rekommenderar att man noga tänker igenom hur DND-funktionen används. En komplett lista med kritiska och icke-kritiska varningar finns i avsnittet *Beskrivningar och åtgärder för varningar* i din bruksanvisning. Kritiska varningar är markerade med en asterisk (*).

Ett exempel på användning av DND



Marie vill minimera antalet varningar hon får, så hon aktiverar DND i sin Eversense®-mobilapp. Hon gillar att hon fortfarande får vibrationer på kroppen, popup-meddelanden med varningar i appen och varningsljud för alla kritiska varningar, men inte för icke-kritiska varningar.

Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversenseddiabetes.com/safety-info.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Apple Watch® är en produkt från Apple, Inc. och kan köpas separat från en auktoriserad Apple-återförsäljare. Apple Watch medföljer inte Eversense CGM-systemet.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.



Continuous Glucose Monitoring System

TILLVERKAD AV
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301 515 7260 | global.eversenseddiabetes.com



DISTRIBUERAS AV
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4, 169 73 Solna
Eversense kundsupport
Tel: 020-83 00 84
E-post: Eversense.se@ascensia.com
Hemsida: diabetes.ascensia.se