

Contour®

SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL




INGEN KODNING

SNABBGUIDE

Din CONTOUR®-mätare:



Din CONTOUR®-teststicka:

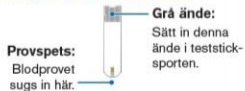

Använda Grundläge

Läs bruksanvisningen för CONTOUR®-mätaren och bipacksedeln för blodprovstagaren för fullständiga instruktioner.
VAR FÖRSIKTIG! Blodprovstagaren är avsedd att användas av en och samma patient.

Förberedelse för test:



VARNING

Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten och torka dem före och efter mätning, vid hantering av mätaren, blodprovstagaren eller teststickorna.

VAR FÖRSIKTIG! Blodprovstagaren som medföljer ditt startpaket är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.

1. Ta bort munstycket på blodprovstagaren.
2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett kvarts varv, men ta inte bort den.



3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp.



4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten.



5. Sätt tillbaka munstycket.



6. Ställ in önskat stickdjup med munstyckets ratt.



7. Sätt in den grå änden på teststickan i teststicksporten på mätaren.



Ingen kodning behövs.

Mätaren kommer att sättas på och en teststicka med en blinkande bloddroppe kommer att visas på din mätardisplay, vilket indikerar att mätaren är klar för testning.

Få fram bloddroppen:

1. Tryck munstycket stadigt mot provtagningsstället och tryck på utlösarknappen.



2. Stryk med handen och fingret mot provtagningsstället för att få fram en bloddroppe.

Testa ditt blod:

1. Doppa teststickans spets i bloddroppen. Blodet sugas upp i teststickan.

Håll spetsen i blodropen tills mätaren piper.



Testning på fingertopp

Ditt resultat* visas efter en 5 sekunder lång nedräkning.

För att stänga av din mätare, ta bort teststickan.

*Din mätare är förinställd och låst för att visa resultat i mmol/L. Om ditt resultat är i mg/dL, kontakta kundsupport på 020-83 00 84.



Utstötning och kassering av den använda lansetten:

1. Använd inte dina fingrar för att ta bort lansetten från blodprovstagaren. Blodprovstagaren som tillhandahålls med ditt startpaket har en automatisk utstötningsfunktion.
2. Se den separata bipacksedeln för blodprovstagaren, om tillhandahållen med ditt startpaket, för instruktioner om automatisk utstötning av lansetten.



VARNING

Kassera den använda lansetten som medicinskt avfall eller enligt rekommendationer från sjukvårdspersonal.

Behöver du hjälp?

Ring: 020-83 00 84

www.diabetes.ascensia.com

Använda Avancerat läge

Läs bruksanvisningen för fullständiga instruktioner.

Ställa in din mätare till avancerat läge

För att ställa in din mätare till avancerat läge, och dra fördel av måltidsmarkeringar och andra tillgängliga funktioner:

1. Tryck på **M** för att sätta på din mätare.
2. Tryck på och håll ned **▲** eller **▼** under 3 sekunder.
3. L-1 kommer att blinka.
4. Tryck på **▲** eller **▼** för att ändra till L-2.
5. Tryck på **M** för att spara inställningen.



Använda markeringar

Läs bruksanvisningen för fullständiga instruktioner.



Före måltid = Markerar ett testresultat som tagits före en måltid.



Efter måltid = Markerar ett testresultat som tagits efter en måltid.



Loggbok = Markerar ett resultat som unikt eller annorlunda på något sätt.



Påminnelse = Ställer in en påminnelse för att påminna dig om att göra ett test efter måltid.



När du utför ett test och ser dina resultat på displayen:

MARKERA RESULTAT	VAD SOM VISAS	STÄLLA IN	VAD SOM VISAS	FÖRKLARING	ANVÄNDA LARMET
Före måltid Tryck på ▲ eller ▼	(Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras som ett test före måltid. Tryck på M igen för att ställa in ett larm.**	När larmet piper sätts mätaren på och du kommer att se ditt testresultat före måltid. Tryck på vilken knapp som helst en gång för att tysta larmet och två gånger för att stänga av mätaren. Kör ett annat blodtest och markera det med en markering efter måltid (se diagrammet till vänster).
Efter måltid Tryck på ▲ eller ▼	(Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras som ett test efter måltid.	
Loggbok Tryck på ▲ eller ▼	(Blinkar)	Tryck på M		Resultatet markeras i minnet som unikt. Du ska notera detta i din loggbok.	

**Larmet är fabriksinställt på 2 timmar. Se bruksanvisningen för fullständiga instruktioner om hur man justerar larmtider.

Felkoder och Symboler

Se din bruksanvisning för en fullständig förteckning av felkoder.

E1	Temperatur utanför intervallet.
E2	Det föreligger ett problem med att fylla teststicken helt. Testa om med en ny teststicka.
E3	Mätaren känner av att teststickan är använd. Testa om med en ny teststicka.
E11	Onormalt resultat. Testa om med en ny teststicka.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Distribueras i Sverige av:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 Stockholm
Sverige

ASCENSIA
Diabetes Care

Kundsupport: 020-83 00 84
www.diabetes.ascensia.com

För information om patent och relaterade licenser, se: www.patents.ascensia.com

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts och No Coding (Ingen Kodning)-logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



85725793
Rev. 03/17