



85701312 Rev. 03/17

## Grundinställning av mätaren och anslutning till MiniMed® 640G insulinpump

### Ladda mätaren

**1** Ta bort USB-locket för att få fram USB-kontakten.




Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätare har ett uppladdningsbart batteri. Ladda din mätare med väggladdaren\* eller genom att ansluta USB-kontakten till en dator. Se till att datorn är på. Din mätare kommer kortvarigt att visa "Testa inte – Laddar" och lampan vid stickporten blinkar. **Du får inte göra ett blodsockertest så länge batteriet laddas.** När laddningen är klar kommer lampan vid stickporten att slockna. Koppla bort din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare för att testa.

### Koppla bort mätaren från laddaren innan du börjar göra inställningarna

**2** För att göra grundinställningarna, håll ner den övre Meny-knappen under flera sekunder, tills mätaren sätts på.



**3** Bläddra nedåt för att välja ditt språk. Tryck på OK.

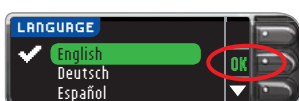


Detta skärmexempel visar val av språk. Språkets ordningsföljd kan variera beroende på ditt land.

**4** Tryck OK om korrekt språk visas. Tryck No om felaktigt språk visas.

### Ansluta till pumpen

**5** Vill du ansluta till en MiniMed-pump? Tryck på OK.

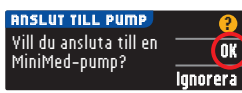


**6** Tryck på OK.




**7** Lägg ned mätaren och ta upp pumpen.

Tryck på valfri knapp för att slå på skärmen och tryck sedan på Meny-knappen. Använd nedpil för att bläddra till **Funktioner**. Tryck på knappen Välj.

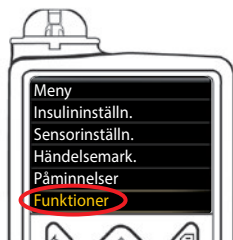


Om pumpskrmen stängs ner, tryck på valfri knapp för att slå på den igen.


**8** Använd nedpilen i menyn Funktioner för att bläddra till **Enhetsalternativ**. Tryck på knappen Välj.

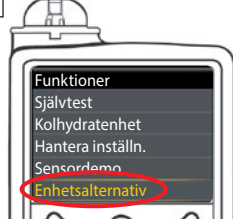

**9** Bläddra till **Ansluta enhet** i menyn Enhetsalternativ. Tryck på knappen Välj.

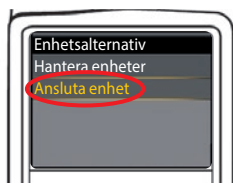

**10** Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Autoanslutning** på pumpen.

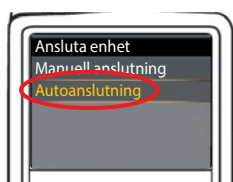

Välj **Autoanslutning** på mätaren.




**11** Läs på pumpskrmen och använd nedpil för att bläddra till nästa sida.

Använd pilknapparna för att bläddra till **Fortsätt**. Tryck på knappen Välj.



**12** Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Sök** på pumpen.

Välj **Sök** på mätaren.


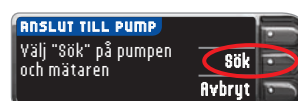


Sökningen kan ta upp till 2 minuter.



**13** Kontrollera att enhetens SN (serienummer) på pumpen motsvarar enhetens SN på mätaren.

Om de stämmer överens bläddra du till **Bekräfta** på pumpen. Tryck på knappen Välj.

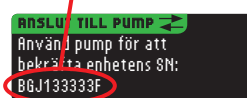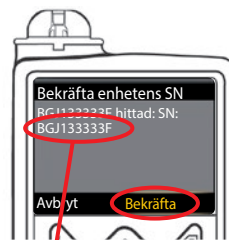


När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på mätarens skärm till ett annat serienummer. Detta nummer är **pumpens SN**.

**14** Vänd på pumpen. Kontrollera att SN på baksidan av pumpen motsvarar pumpens serienummer, som nu visas på mätarens skärm. Tryck på **Nästa**.




**15** Välj **Alltid** och tryck på OK på nästa skärm.

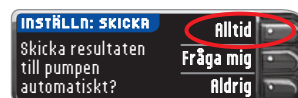

**16** Välj **Datumformat**.



**17** Tryck på OK. Observera: Om tid och datum är felaktiga måste du ändra dem på pumpen.

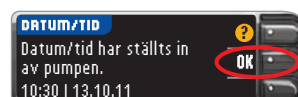

**18** Tryck på **Acceptera** för att välja **AutoLog är Avstängt**.

AutoLog ger dig möjlighet att markera ett testresultat som **Fastar**, **Före måltid** eller **Efter måltid**. Se bruksanvisningen för att få veta mer.



Vänd på sidan för att slutföra inställningen. ➔


\*Väggladdare medföljer kanske inte i alla startpaket. Kontakta kundsupport för information om hur du kan beställa en väggladdare.

PROCESS C	PROCESS M	PROCESS Y	PROCESS K	FOLD
RR DONNELLEY		FILE NAME: 85701312_CntrNxtLnk2_4_QRG_SV.indd		NEW COMP BAN: 85701312 REV: 03/17
5050 1st Ave South Suite #101 Seattle, WA 98134 Tel: 206.587.0800 Fax: 206.587.0356		MARKET: SE	CLIENT: Ascensia Diabetes Care	V0 03/06/17 Initial Build V1 03/25/17 DMC Annotations V2 03/30/17 DMC Annotations
PROGRAM VERS: InDesign CC(2014)		SKU: MULTI	SPEC: 10000752618 REV -	BAR CODE: 85701312 (12 x 12 2D Matrix)
LANGUAGES: SV		PARENT BAN: 84584399	PREVIOUS BAN: 84376116	
TRIM SIZE: 16.5" (H) x 8" (W)		MASTER REF: CntrNxtLnk2_4_M_QRG_0304B_R0004		
LASER PROOF		EPSONS PROOF		SIGNATURE
VERSION: V2		APPROVED		DATE
RESUBMIT WITH CHANGES		RESUBMIT WITH CHANGES		DATE
PROJ. MGR. SIGNATURE		PROJ. MGR. SIGNATURE		DATE
PROJ. MGR. SIGNATURE		PROJ. MGR. SIGNATURE		DATE
PROJ. MGR. SIGNATURE		PROJ. MGR. SIGNATURE		DATE



## 19 Acceptera eller Ändra Hög och Låg Varningsnivå.

Mätaren varnar dig med ett ljud när ditt blodsockerresultat är över eller under dina inställda varningsnivåer.

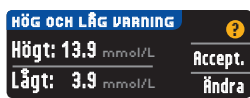


## 20 Acceptera eller Ändra ditt målintervall.

Målintervallet är ditt mål för dina blodsockertestresultat.



**OBSERVERA:** Varningar kan bara ställas in utanför ditt/dina valda målintervall. Mål kan bara ställas in innanför din/dina valda varningsnivå(er). För ytterligare information, kontakta kundsupport. Se kontaktuppgifter till kundsupport nedan.

**21** Nu är systeminställningarna klara och du är redo att göra ett blodsockertest. Gå till Steg 1 nedan.

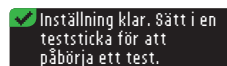

## Testmaterial



CONTOUR®NEXT teststicka



Blodprovstagare



Lansett



CONTOUR®NEXT LINK 2.4-blodsockermätare

### ⚠ VIKTIGT:


- Blodprovstagaren är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.<sup>1,2</sup>
- ⓧ Använd en ny lansett varje gång du testar, eftersom de inte längre är sterila efter användning.
- Alla delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskavfall och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring.
- Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten och torka dem noggrant före och efter mätning samt vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor.

För fullständiga instruktioner om hur du rengör mätaren, se mätarens bruksanvisning.


## Testa ditt blodsocker

### Få fram en bloddroppe

- 1** För in teststickan och vänta tills meddelandet **TILLSÄTT BLÖD** visas.

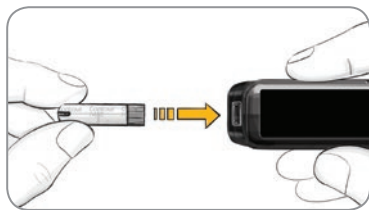


- 2** Ta bort munstycket från blodprovstagaren. För in lansetten bestämt i blodprovstagaren så långt det går.

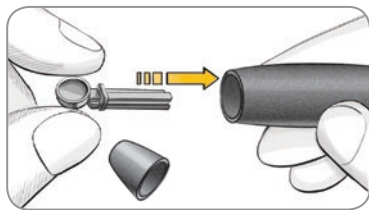


Bilder på blodprovstagaren visas endast som illustration. Din blodprovstagare kan se annorlunda ut. Se bipacksedeln för blodprovstagaren för detaljerade instruktioner om förberedelse av blodprovstagaren.

- 3** Sätt tillbaka munstycket. Vrid det justerbara munstycket för att justera stickdjupet.

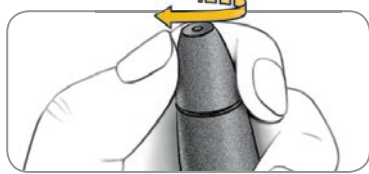


- 4** Ta fram din bloddroppe.

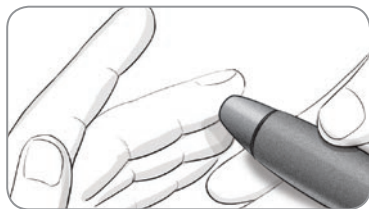

### Testa en bloddroppe

- 5** Doppa teststickans spets i bloddroppen. Om den första bloddroppen inte räcker piper mätaren två gånger och visar skärmen **FÖR LITE BLÖD PÅ TESTSTICKA**. Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod på samma teststicka.

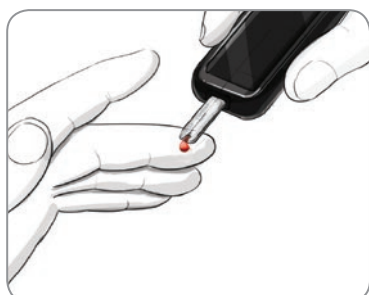

### Skicka resultat till din MiniMed-pump

- 6** Om **Alltid** valdes i **Inställningar för skicka** under **Inställningar** kommer resultaten att skickas direkt till din pump. Om **Fråga mig** valdes i **Inställningar för skicka** under **Inställningar** kan du välja att skicka dina resultat till din pump efter varje blodsockertest.

Tryck på **Skicka** eller **Skicka ej**.



**VIKTIGT:** Kontrollera alltid displayen på din pump för att vara säker på att det visade blodsockerresultatet överensstämmer med det blodsockerresultat som visas på mätaren.


### Bolusdoser, Påminnelser och Noteringar

- 7** Välj **Bolus** för att skicka en bolusdos till pumpen. Välj **Påminn.** för att ställa in en påminnelse för ditt nästkommande test. Välj **Notering** för att lägga till mer information till resultatet.



### Kontrollera att resultatet har skickats till pumpen

- 8** Ta upp pumpen. Tryck och håll nere knappen **Tillbaka** för att återvända till hemskärmen. Ditt blodsockerresultat ska visas på pumpskrärmen.

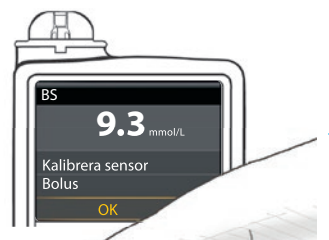

### Stäng av mätaren

- 9** Ta bort teststickan, så stängs mätaren av inom 3 minuter. Eller håll **Meny-knappen** nedtryckt för att stänga av mätaren.



Se bruksanvisning för CONTOUR NEXT LINK 2.4, bipacksedeln för blodprovstagaren och bruksanvisningen för MiniMed insulinpump för fullständiga instruktioner.

Ascensia Diabetes Care kundsupport finns tillgänglig vardagar, under kontorstid. 020-83 00 84

[www.diabetes.ascensia.se](http://www.diabetes.ascensia.se)

För information om patent och relaterade licenser, se: [www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

IVD För in vitro-diagnostik

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland



Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts och No Coding (Ingen Kodning)-logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed och Paradigm är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc.

**Medtronic**

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

### Referenser

- <sup>1</sup> US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- <sup>2</sup> Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>