





MiniMed™ 670G pumpen visas

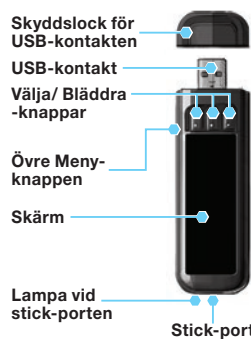

Anvisningar för installation av trådlös anslutning

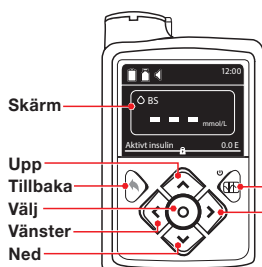

OBSERVERA: Kontrollera mätenheten på din mätare. Se din mätares bruksanvisning för fullständiga instruktioner.

Ansluta CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätaren till MiniMed™ 670G-insulinpumpen

Ladda mätaren


- 1** Ta bort USB-locket för att få fram USB-kontakten.




CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare har ett permanent uppladdningsbart batteri. Ladda din mätare med vägggladdaren eller genom att ansluta USB-kontakten till en dator. Se till att datorn är på. Din mätare kommer kortvarigt att visa "Testa inte – Laddar" och lampan vid stickporten blinkar. **Du får inte göra ett blodsockertest så länge batteriet laddas.** När laddningen är klar kommer lampan vid stickporten att slockna. Koppla bort din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare för att testa.

Koppla bort mätaren från laddaren innan du börjar göra inställningarna

- 2** För att göra grundinställningarna, håll ner den övre Meny-knappen under flera sekunder, tills mätaren sätts på.

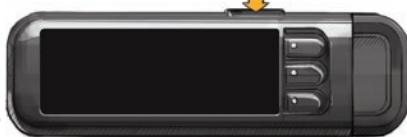

- 3** Bläddra nedåt för att välja ditt språk. Tryck på **OK**.

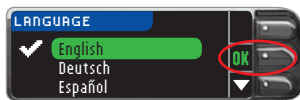

Detta skärmexempel visar val av språk. Språkets ordningsföljd kan variera beroende på ditt land.

- 4** Tryck **OK** om korrekt språk visas. Tryck **No** om felaktigt språk visas.

Ansluta till pumpen

- 5** Vill du ansluta till en MiniMed-pump? Tryck på **OK**.



- 6** Tryck på **OK**. Lagg ned mätaren och ta upp pumpen.



- 7** Tryck på knappen **Välj**. Använd **Ned**-pilknappen för att bläddra till **Alternativ**. Tryck på knappen **Välj**.

Om pumpskrmen stängs ner, tryck på valfri knapp för att slå på den igen.




- 8** Tryck Ned-pilknappen för att bläddra till **Funktioner**. Tryck på knappen **Välj**.

Använd nedpilen i menyn **Funktioner** för att bläddra till **Enhetsalternativ**. Tryck på knappen **Välj**.




- 9** Bläddra till **Ansluta enhet** i menyn **Enhetsalternativ**. Tryck på knappen **Välj**.

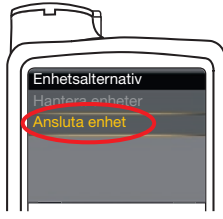

- 10** Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Autoanslutning** på pumpen.




Välj **Autoanslutning** på mätaren.

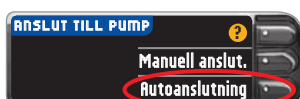

- 11** Läs på pumpskrmen och använd nedpil för att bläddra till nästa sida.



Använd pilknapparna för att bläddra till **Fortsätt**. Tryck på knappen **Välj**.

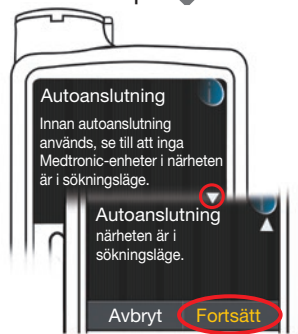

- 12** Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Sök** på pumpen.


Välj **Sök** på mätaren.

Sökningen kan ta upp till 2 minuter.

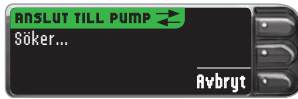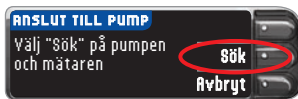

- 13** Kontrollera att enhetens SN (serienummer) på **pumpen** motsvarar enhetens SN på **mätaren**.

Om de stämmer överens bläddrar du till **Bekräfta** på pumpen. Tryck på knappen **Välj**.

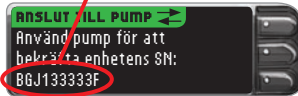

När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på **mätarens** skärm till ett annat serienummer. Detta nummer är **pumpens** SN.

- 14** Vänd på pumpen. Kontrollera att SN på baksidan av **pumpen** motsvarar pumpens serienummer, som nu visas på **mätarens** skärm. Tryck på **Nästa**.




- 15** Välj **Alltid** och tryck på **OK** på nästa skärm.




- 16** Välj **Datumformat**.



- 17** Tryck på **OK**. *Observera: Om tid och datum är felaktiga måste du ändra dem på pumpen.*

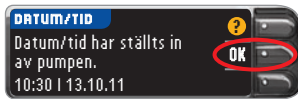

- 18** Tryck på **Acceptera** för att välja **AutoLog** är **Avstängt**. *AutoLog ger dig möjlighet att markera ett testresultat som Fastar, Före måltid eller Efter måltid. Se bruksanvisningen för att få veta mer.*

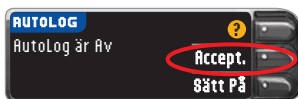

Vänd på sidan för att slutföra inställningen. →

- 19** **Acceptera eller Ändra** Hög och Låg Varningsnivå.
Mätaren varnar dig med ett ljud när ditt blodsockerresultat är över eller under dina inställda varningsnivåer.




- 20** **Acceptera eller Ändra** ditt målintervall.
Målintervall är ditt mål för dina blodsockertestresultat.



OBSERVERA: Varningar kan bara ställas in utanför ditt/dina valda målintervall. Mål kan bara ställas in innanför din/dina valda varningsnivå(er). För ytterligare information, kontakta kundsupport. Se kontaktuppgifter till kundsupport nedan.

- 21** Nu är systeminställningarna klara och du är redo att göra ett blodsockertest.

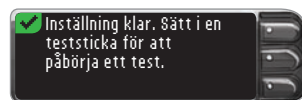

Se bruksanvisning för CONTOUR NEXT LINK 2.4, bipacksedeln för blodprovstagaren och bruksanvisningen för MiniMed insulinpump för fullständiga instruktioner.

Ascensia Diabetes Care kundsupport finns tillgänglig vardagar, under kontorstid. 020-83 00 84

Se Kundsupportts öppettider genom att besöka www.diabetes.ascensia.com

IVD För in vitro-diagnostik

Distribueras i Sverige av:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 Stockholm
Sverige
Kundsupport: 020-83 00 84
diabetes@ascensia.com
www.diabetes.ascensia.com
www.diabetes.ascensia.se



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

För information om patent och relaterade licenser, se:
www.patents.ascensia.com

Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts och No Coding (Ingen Kodning)-logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Medtronic, Medtronic-logotypen och MiniMed är varumärken som tillhör Medtronic.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.